



Technický list

CLEAMEN 540

Objem: 1 L Kód výrobku: VC540010097



Popis výrobku:

Tekutý dezinfekční prostředek na bázi alkoholu se širokým spektrem účinku. Je vhodný pro dezinfekci menších ploch ve zdravotnictví, domácnostech, například technologická zařízení, operační stoly, nástroje, lůžka, gumová obuv, laboratorní přístroje a plochy vyžadující zvýšený dezinfekční režim. Přípravek není vhodný pro dlouhodobé používání na plastové povrchy.

Spektrum dezinfekčního účinku: Baktericidní (15 min), fungicidní (15 min), tuberkulocidní (30 min). Typ: 2

Ev. č. v ČR: MZDR 9141/2020/OBP Rozhodnutí v SR: bio/2567/D/20/CCHLP

Účinná biocidní látka (g/100g): propan-1-ol (EC: 200-746-9): 40 g, ethanol (EC: 200-578-6): 27 g.

Návod k použití:

Používá se neředěný. Na plochy aplikovat postřikem ze vzdálenosti 40-50 cm. Může se použít také ponorný způsob. Doba působení: 15 min. Spotřeba: 10 ml/m².

Pracovní roztok k přímému použití	Účinek na bakterie a mykobakterie spektra: A (ČSN EN 13727), T (ČSN EN 14348)	Účinek na plísňové spektra: V (ČSN EN 13624)
	Nezbytná doba působení	
	15 minut	15 minut
Běžná spotřeba na 1 m ²	10 ml	10 ml

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství:

pH:

Barva:

Vůně:

Tekutina

7,00

Bez barvy

Charakteristický



Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

	Kusů v kartonu	Kartonů ve vrstvě	Vrstvy na paletě	Kusů na paletě
1 L	12	8	4	384
	0			0

Složení:

NEBEZPEČÍ.

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Bezpečnostní pokyny: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné

rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz