



Technický list

CLEAMEN 540

Objem: 1 L Kód výrobku: VC540010096
0



	A	MRSA	V	(V)	(B)
	0,5-3 min	2 min	60 min	2 min	3 min
Hygienická dezinfekce ruk podla normy EN 1500	Dávkované množství: 3 ml		Doba působení: 60 sekund		

Popis výrobku:

Bezoplachová dezinfekce povrchů a pokožky se širokým spektrem účinku. Používá se pro dezinfekci povrchů, nástrojů a pokožky v potravinářství, zdravotnictví i v ostatních provozech vyžadujících zvýšený dezinfekční režim. Je vhodná pro použití na nástroje, lůžka, gumovou obuv, laboratorní přístroje, vakuovačky, baličky, koženku, plasty, laminát, nerezové plochy a technologie. Přípravek je určen k přímému použití a má vynikající dezinfekční účinky se širokým spektrem účinku. Neobsahuje aldehydy, není parfemovaný.

Přípravek splňuje normy: EN 13727, MRSA, EN 1276, EN 14561, EN 14562, EN 13624, EN 1650, EN 14476 obalené viry, EN 1500

Oblast použití PT: 1, 2, 4. Profesionální a spotřebitelské použití.

Spektrum dezinfekčního účinku: Baktericidní (0,5-3 min; A, MRSA), fungicidní (60 min; V), levurocidní (2 min; (V)), virucidní obalené viry (3 min; (B)), hygienické drhnutí rukou (3 ml/60s).

Účinná biocidní látka (g/100g): Ethanol (CAS: 64-17-5): 25,8g, Alkyl (C12-16) dimethylbenzylamonium chlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) (CAS: 68424-85-1) 1,27g a 2-fenoxiethan-1-ol (CAS: 122-99-6) 1g.

Návod k použití:

Na ošetřované plochy aplikujte mechanickým rozprašovačem, nanesený prostředek neotírejte. Vydezinfikované povrchy, které přichází do přímého styku s potravinami, po uplynutí expoziční doby, opláchněte pitnou vodou. Lze jej použít i pro ponornou dezinfekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, kadernictví, kosmetických salonech, masérských salonech apod. Dezinfikované nástroje ponechte ponořené v koncentrátu dle doporučené doby působení (viz. tabulka) a před použitím opláchněte vodou. Spotřeba: 10 ml/m². Pro hygienickou dezinfekci rukou použijte dostatečné množství přípravku (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství:	Tekutina
pH:	5,0-7,0
Barva:	Bez barvy
Vůně:	Charakteristický

Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.



VAROVÁNÍ.

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Vyčištěný obal bez zbytkového obsahu výrobku odstraňte do tříděného odpadu.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Ev. č. v ČR: MZDR 22333/2022/OBP
Číslo oznámení: bio/3090/D/22/CCHLP

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz